




MASSAGESESSEL

MSW-16003HH

Bedienungsanleitung

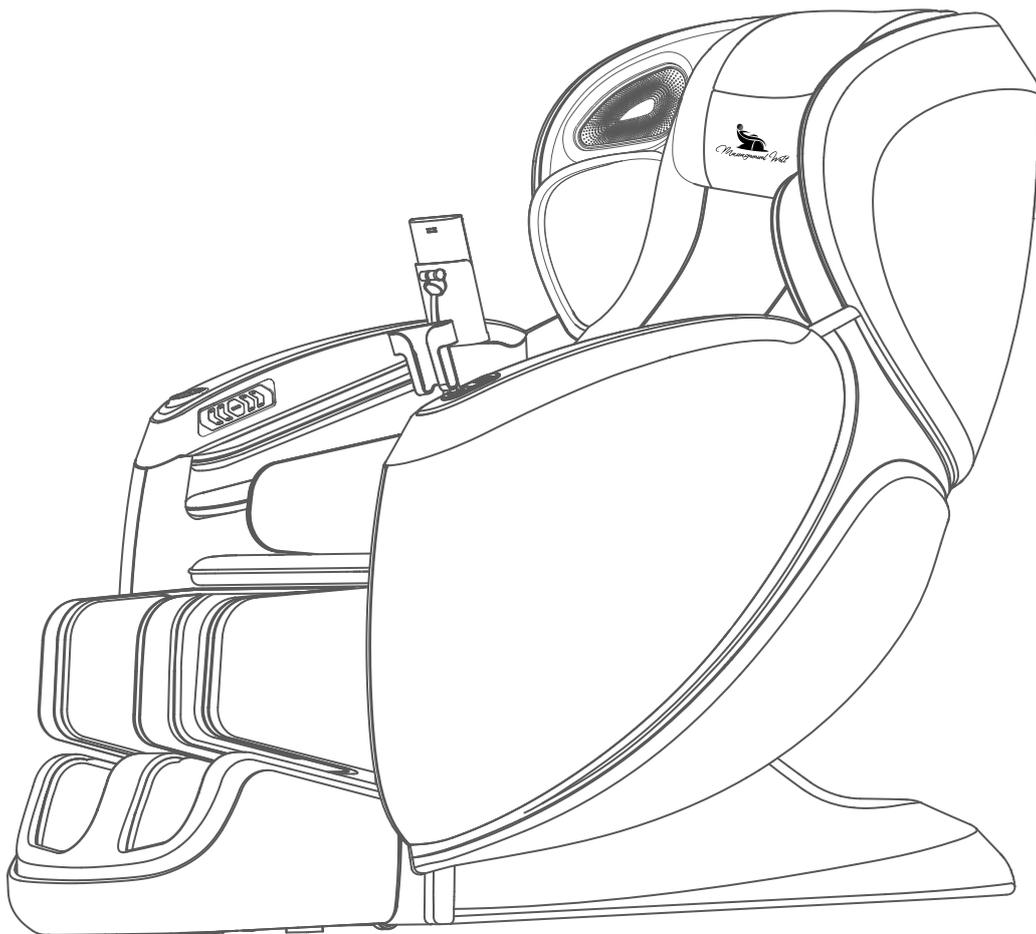

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Sessel verwenden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

MSW-16003HH MASSAGESESSEL

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um den richtigen Gebrauch des Sessels zu lernen. Achten Sie besonders auf wichtige Sicherheitshinweise und bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
Installation des Sessels.....	7
Bezeichnungen der Teile und Funktion.....	12
Vor jeder Massage.....	14
Verfahren zum Einstellen des Sessels.....	15
Automatische Massageprogramme.....	16
Grundlegende Massagemethoden.....	19
Manueller Massage-Modus.....	21
Luftdruckmassage-Modus.....	22
Andere Funktionen.....	24
Reinigung und Lagerung.....	25
Fehlerbehebung.....	26
Wartung & Garantie.....	27
Produktspezifikation.....	28

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Sessel verwenden.
- Die hier aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sollen Sie daran erinnern, diesen Sessel richtig zu benutzen, um Sie und andere vor Verletzungen oder Schäden zu schützen.



Vorsicht:

Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Benutzer verletzt oder Gegenstände können beschädigt werden, einschließlich der Beschädigung von Wohnung und Hausrat oder der Verletzung von Haustieren. Das Gerät verfügt über eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht empfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.

BEISPIEL FÜR EIN SYMBOL

	△ Weist auf eine Warnung oder einen Hinweis hin (Das Beispiel auf der linken Seite zeigt allgemeine Warn- und Vorsichtshinweise.)
	⊘ Weist auf verbotenes Verhalten hin (Das Beispiel auf der linken Seite zeigt, dass es verboten ist, den Sessel zu demontieren.)
	● Weist auf eine Anweisung hin, die obligatorisch ist (Das Beispiel links zeigt, dass das Gerät ausgesteckt werden muss.)

- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem Ort auf, an dem Sie sie jederzeit nachlesen können.



Die folgenden Personen müssen vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren:

- Patienten mit Krebserkrankungen
- Mutterschaft oder Menstruation
- Hohes Fieber
- Patienten mit akuter Erkrankung (schmerzhaft)
- Patienten mit Osteoporose
- Patienten mit Wahrnehmungsstörung
- Kardiopathie
- Anämie
- Benutzer von Herzrhythmusgeräten oder anderen implantierten Geräten
- Wirbelsäulenanomalien oder -verkrümmungen
- Personen, die in Behandlung sind oder sich körperlich unwohl fühlen
- Zur Verwendung in bereits behandelten oder verletzten Bereichen
- Menschen, die Ruhe brauchen
- Menschen mit schweren Blutkreislaufstörungen an den Füßen
- Mit gelegentlichen körperlichen Beschwerden

 ACHTUNG	
	Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Sessel nicht funktioniert oder nicht normal funktioniert, und bitten Sie den Verkäufer, diesen zu überprüfen und zu reparieren, um Stromschläge, Leckstrom, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.
	Achten Sie bei der Massage des Nackens auf die Bewegung der Massagerollen und massieren Sie nicht zu stark. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
	Wenn Sie die Rückenlehne und die Beinauflage anheben/absenken, achten Sie bitte darauf, dass sich keine Personen, Gegenstände oder Haustiere auf der Rückenlehne und unter der Beinauflage befinden, um Verletzungen zu vermeiden.
	Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Sesselbezug nicht beschädigt ist, (wenn er beschädigt ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker und fordern Sie eine Reparatur an) um Verletzungen oder Stromschläge durch den beschädigten Sesselbezug zu vermeiden.


	Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Sie keinen Schmuck tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Kontrollieren Sie, dass die Massagezeit auf 15 Minuten eingestellt ist. Kontrollieren Sie außerdem, dass die Massagezeit einer einzelnen Stelle nicht länger als 5 Minuten beträgt. Eine zu lange Dauermassage kann Muskel- und Nervenschmerzen verursachen. Es wird empfohlen, die Massagezeit auf 30 Minuten pro Tag zu begrenzen.
	Wenn Sie während der Massage irgendwelche körperlichen Beschwerden feststellen, beenden Sie bitte sofort die Anwendung.
	Schalten Sie nach dem Gebrauch den Netzschalter aus, um Unfälle durch spielende Kinder zu vermeiden.
	Verwenden Sie den Sessel an einem horizontalen ebenerdigen Ort, um Fehlfunktionen und Unfälle zu vermeiden.
	Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Fernbedienungskabel stolpern, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
	Überprüfen Sie die Position der Massagerollen, bevor Sie sie benutzen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
	Bewegen Sie den Sessel so, dass auf der Oberfläche keine Kratzer entstehen.
	Verwenden Sie keine andere Stromquelle als 220 V, um Stromschlag oder Funkenbildung zu vermeiden.
	Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein, um Stromschlag, Kurzschluss und Funkenbildung zu vermeiden.
	Achten Sie auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht beschädigt, verbogen, gedehnt, verdreht, geklebt oder festgezogen werden. Stellen Sie außerdem das Gerät nicht unter schwere Gegenstände, und achten Sie besonders darauf, dass das Netzkabel beim Transport nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden, was zu Stromschlägen oder Funkenbildung führen kann.
	Erlauben Sie Kindern nicht, ihn allein zu benutzen, und halten Sie kleine Kinder fern.
	Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Sessel zu spielen, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
	Benutzen Sie keine anderen Therapiegeräte während Sie diesen Sessel verwenden.
	Schlafen Sie während der Massage nicht ein, da eine unbewusste Massage zu Verletzungen oder Unwohlsein führen kann.
	Verwenden Sie den Sessel nicht für andere Zwecke als zur Massage, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.
	Stecken Sie den Netzstecker ganz ein und achten Sie darauf, dass kein Staub oder Schmutz am Stecker anhaftet. Dies kann Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände verursachen.
Nicht in der Nähe von offenen Flammen, wie z. B. einem Herd, verwenden. Nicht beim Rauchen verwenden. Verwenden Sie ihn nicht mit Heizgeräten, wie z. B. Heizdecken, da dies einen Brand verursachen kann.	

	<p>Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen worden sind. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.</p>
	<p>Ziehen Sie nicht zu stark am Leder. Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen darauf ein, um Verletzungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.</p>
	<p>Nicht mit Benzin, Verdünner usw. abwischen. Sprühen Sie kein Insektizid, um Stromschläge und Funken zu vermeiden.</p>
	<p>Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, die Armlehne oder die Beinauflage, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.</p>
	<p>Rollen und ziehen Sie den Sessel nicht auf Oberflächen, die leicht zerkratzt werden können, wie z. B. Holzböden oder Teppiche.</p>
	<p>Lassen Sie den Sessel nicht fallen und stoßen Sie ihn nicht, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.</p>
	<p>Benutzen Sie den Sessel nicht direkt nach einer Mahlzeit, um Unwohlsein zu vermeiden.</p>
	<p>Bewegen Sie den Sessel nicht, wenn sich Personen oder Gegenstände darauf befinden, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.</p>
	<p>Setzen Sie nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig auf den Sessel, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.</p>
	<p>Nicht an Ellbogen, Knien, Kopf und Bauch anwenden. Legen Sie Ihre Hände und Füße nicht zwischen die Massagerollen, um Verletzungen und Unwohlsein zu vermeiden.</p>
	<p>Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn Sie harte Gegenstände, wie z. B. Haarschmuck, tragen, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.</p>
	<p>Legen Sie Ihren Kopf und Ihre Hände nicht unter die Beinauflage und unter den Sessel, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.</p>
	<p>Im Falle eines Stromausfalls schalten Sie bitte sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um Unfälle zu vermeiden, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird.</p>
	<p>Wenn Sie den Netzstecker herausziehen, halten Sie ihn an der Vorderseite und ziehen Sie nicht am Kabel. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages oder eines Kurzschlusses, was zu einem Brand führen kann.</p>
	<p>Wenn der Sessel nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose, da Staub und Feuchtigkeit die Drähte altern lassen und es zu Bränden durch elektrische Streu- und Leckströme kommen kann.</p>
	<p>Bei Wartungsarbeiten ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein und ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen heraus, da dies zu Stromschlag und Verletzungen führen kann.</p>
	<p>Stellen Sie den Sessel nicht an einem feuchten Ort auf, z. B. in einem Badezimmer, da dies zu einem Stromschlag, Brand, Ausfall und Rost führen kann.</p>
	<p>Mit Ausnahme von Servicetechnikern darf niemand den Sessel zerlegen, reparieren oder verändern. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.</p>

Installation des Sessels


Nehmen Sie den Hauptkörper und das Zubehör aus dem Verpackungskarton

Hauptkörper

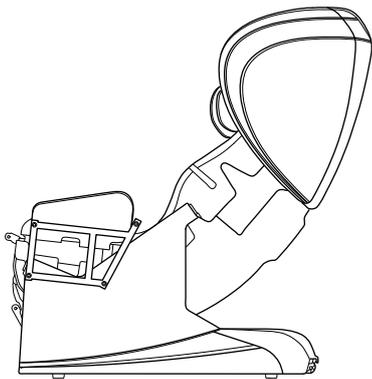


Zubehör


Linke/rechte Seitenwand

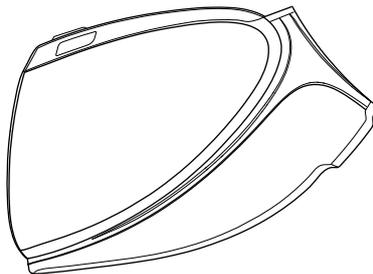

Halterung für die Fernbedienung

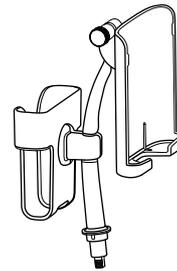


Fußmassagegerät

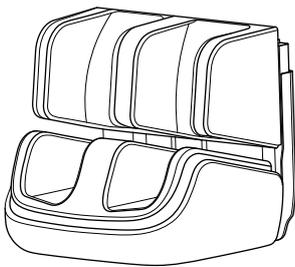

Kopfstütze



Abdeckung der Rückenlehne

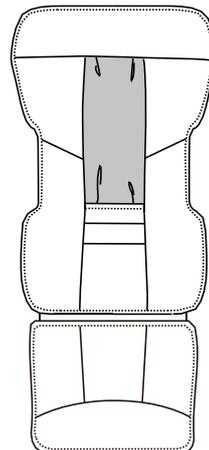


Bedienungsanleitung



Werkzeugkasten



Netzkabel

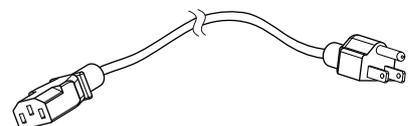

Installation des Sessels


Leitfaden zur Installation

Installation des Fußmassagegeräts

1. Richten Sie das Fußmassagegerät mit den Verbindungslochern auf beiden Seiten des Sessels aus und setzen Sie Nieten und Stift ein. * Abbildung ①
2. Verwenden Sie Nieten und Stift, um das Sesselunterteil an dem Fußmassagegerät zu befestigen. *Abbildung ②
3. Installieren Sie die Luftkissen an den Lufteinlassanschlüssen (ZWEI Anschlüsse), die mit den entsprechenden Farben verbunden und mit Kabelbindern fixiert werden müssen. Schließen Sie dann die DREI Drähte an, und decken Sie sie mit dem Reißverschlussstoff nach dem Anschließen ab.
4. Verbinden Sie das Sitzkissen mit dem Reißverschluss an der Fußstütze.


*Abbildung ①

Installationsposition des Fußmassagegeräts.

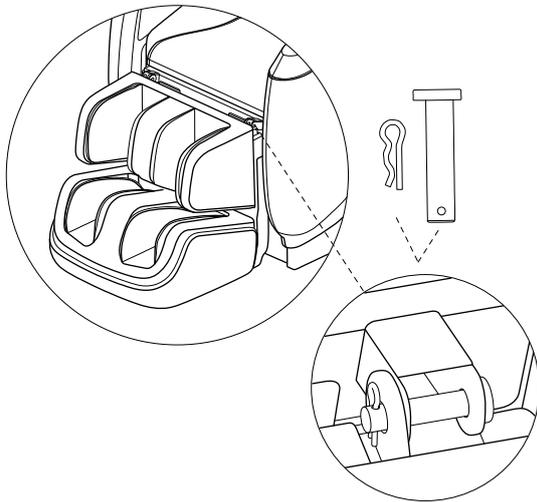


*Abbildung ②

Installationsposition der Stößelstange an der Fußstütze.

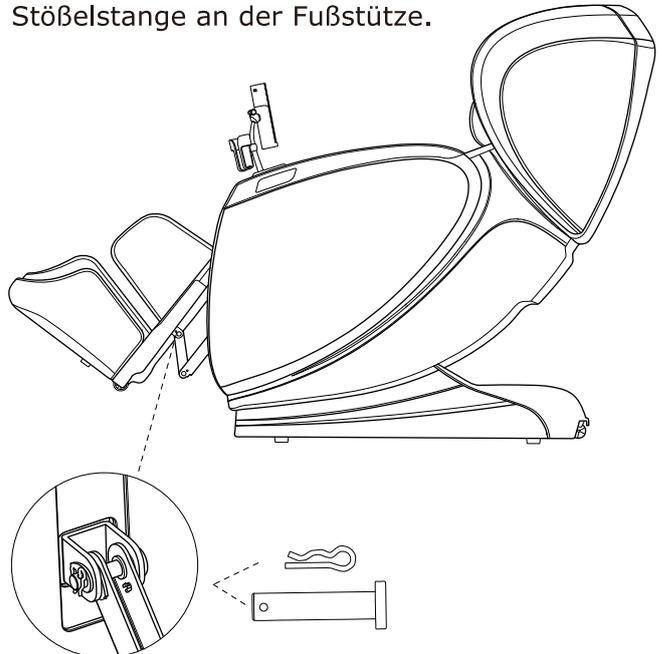

Installation der Halterung für die Fernbedienung

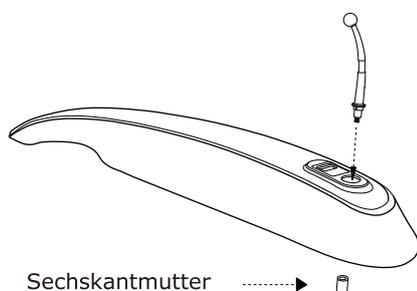


Sechskantmutter

Schritt 2



4x16
Rundkopfschraube
mit flachem Ende

Schritt 3

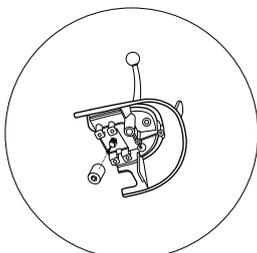

Handschraube

1. Verwenden Sie den L-förmigen Sechskantschlüssel M5, um die Sechskantmutter an der Fernbedienungshalterung zu befestigen.
2. Die Handyhalterung und ihre Abdeckung werden mit einer 4x16 Rundkopfschraube mit flachem Ende an der Fernbedienungshalterung befestigt.
3. Verwenden Sie die Handschraube, um die Halterung der Fernbedienung zu befestigen.

Installation des Sessels

Installation der Seitenwände

Schritt Eins

1. Richten Sie die Löcher der Innenverkleidung mit den Befestigungslöchern des Sitzrahmens aus, indem Sie 5 Schrauben festziehen. Abbildung ① (M6x20 Innensechskantschraube*1, M6x20 Rundkopfschraube*5)

2. Installieren Sie die Luftkissen an den Lufteinlassanschluss, der mit den entsprechenden Farben verbunden werden muss; schließen Sie dann das Kabel an die Luftventilplatte an, und befestigen Sie es nach dem Anschluss mit einem Kabelbinder. Abbildung ②

※ Das linke Verbindungskabel muss zuerst von der Innenseite zur Armlehnenabdeckung verlegt werden.

※ Nachdem Sie das Kabel mit der inneren Klemme der Lampenabdeckung der oberen Armlehnenabdeckung verbunden haben, verriegeln und fixieren Sie es mit einem Fixierknopf. Abbildung ③

Abbildung ①

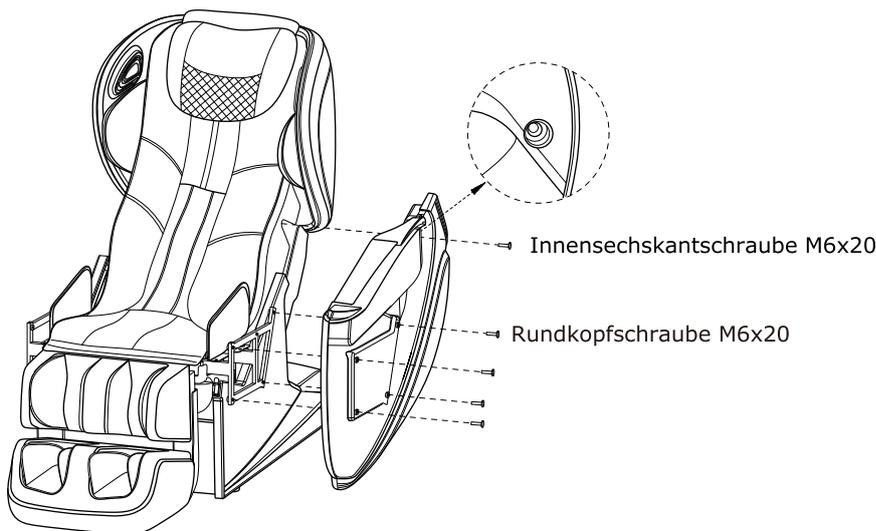


Abbildung ②


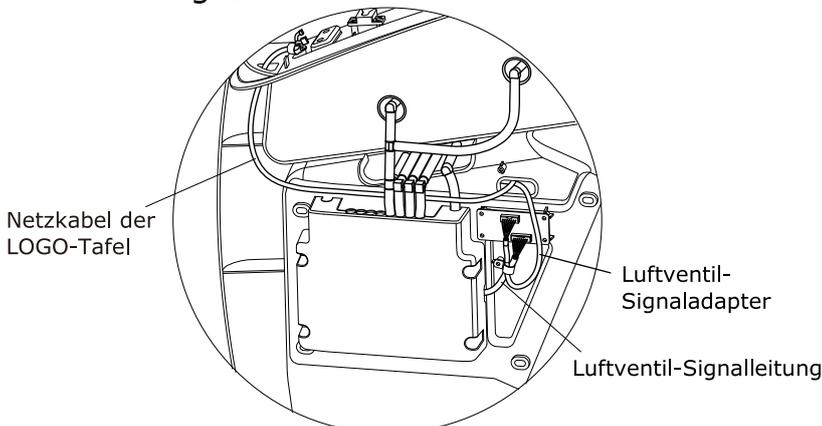



Abbildung ③

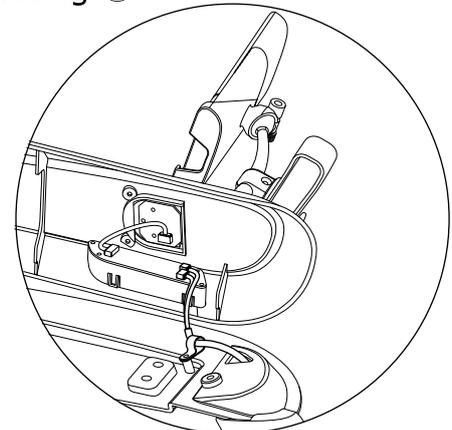

Installation des Sessels

Schritt Zwei

3. Nach der Installation der inneren Wand, installieren Sie die äußere Wand indem Sie den festen Riegel zuerst von vorne nach hinten schieben und dann mit 3,5x16 Rundkopfschrauben mit spitzem Ende befestigen.

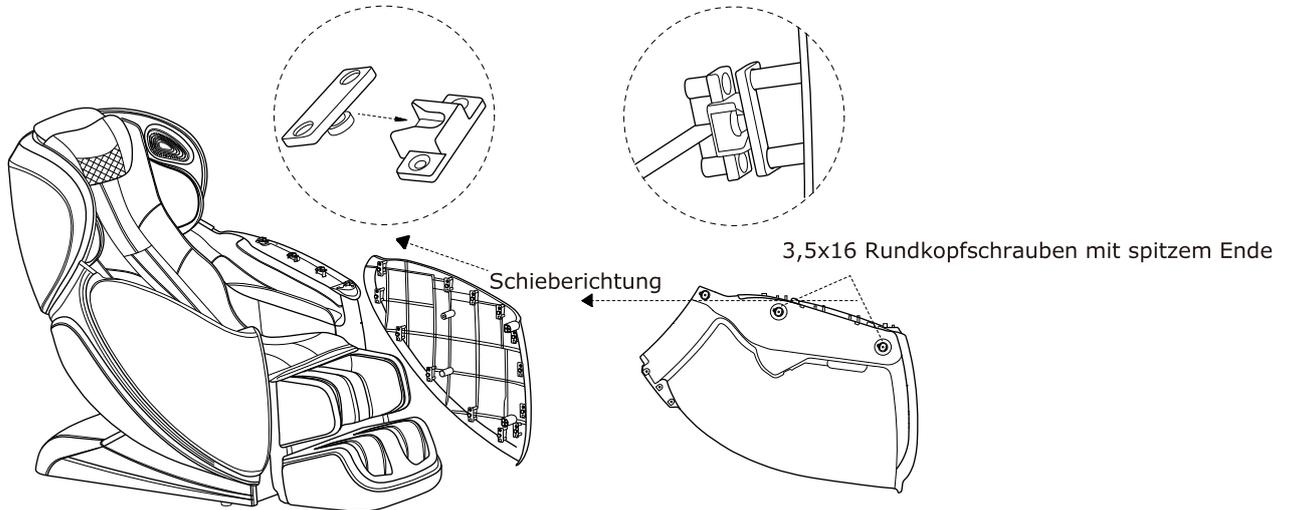



Schritt Drei

4. Wenn Sie die obere Abdeckung der linken Armlehne anbringen, bringen Sie zuerst die Halterung für die Handsteuerung an und schieben Sie sie dann in die feste Aussparung.


5. Nach der Positionierung werden 2 Schrauben (M4x25) der Armlehnenabdeckung an der Vorderseite und an den Enden von unten nach oben befestigt.

Die Seitenplattenbaugruppe besteht aus einer Steckverbindung.

Verbinden Sie den Stecker von innen nach außen mit der Buchse an die Unterseite

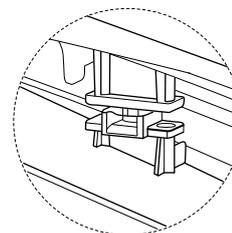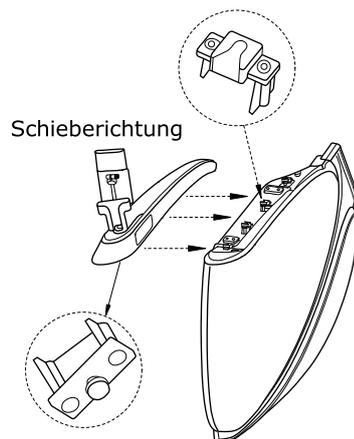

Schrauben der Armlehnenabdeckung (M4x25)

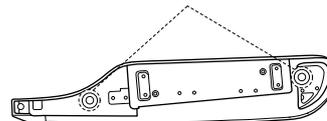

Verbinden Sie die gemeinsame Seite von innen nach außen mit der Buchse an die Unterseite

Achtung

※ Achten Sie darauf, sie sicher zu montieren, sonst kann sie herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.


Installation des Sessels

Aufstellen des Massagesessels

Stellen Sie den Massagesessel an einem ebenen Ort auf, und lassen Sie Platz um den Sessel herum.

Achten Sie beim Aufstellen des Massagesessels darauf, dass um den Sessel herum genügend Platz ist, damit sich die Beinauflage und die Rückenlehne des Sessels frei heben und senken können.


Es wird empfohlen, eine Unterlage unter den Sessel zu legen, um Schäden am Boden oder Teppich zu vermeiden.

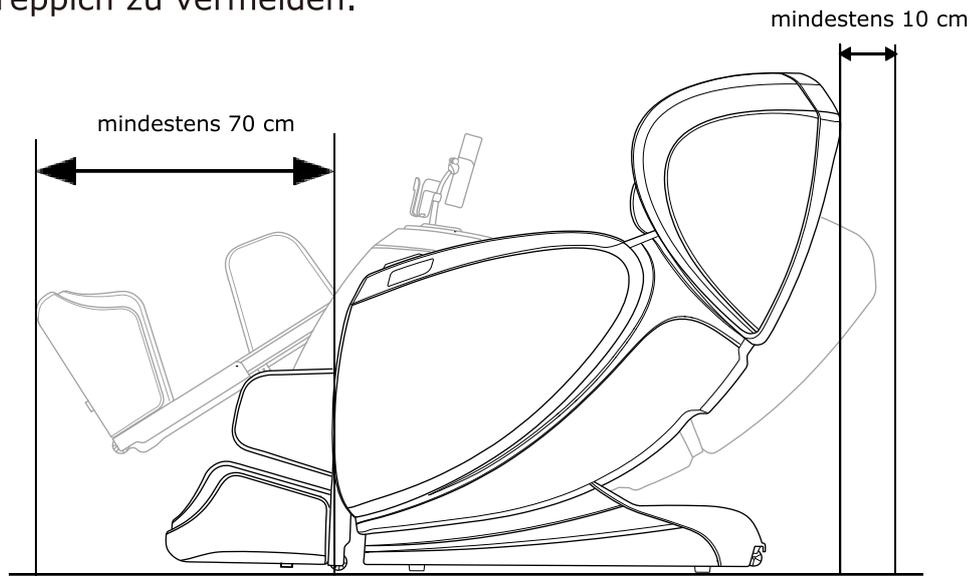

Installation des Sessels

Bewegen des Sessels

Kippen Sie den Sessel, wie in der Abbildung unten gezeigt, um ca. 45° nach hinten und schieben Sie ihn mit den Rollen vorsichtig nach vorne oder hinten in die entsprechende Position.


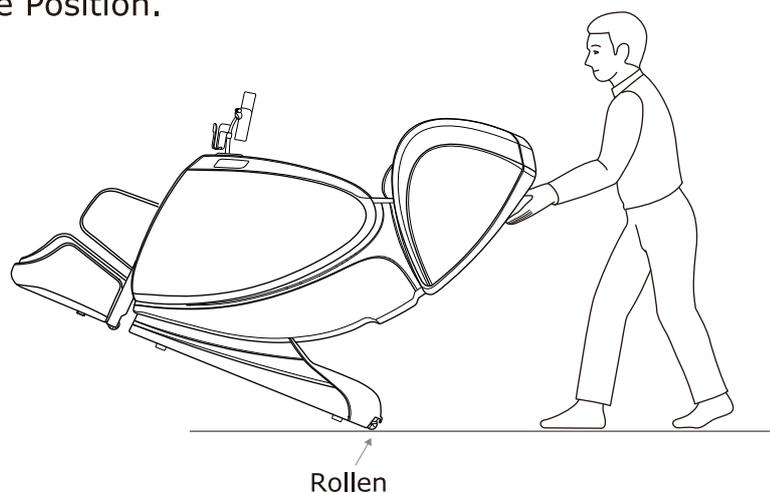


Bitte beachten Sie!

- Bewegen Sie den Massagesessel nicht, während sich jemand auf dem Sessel befindet.
- Heben Sie den Sitz und die Beinauflage beim Bewegen nicht an.
- Legen Sie die Steuerung beim Bewegen auf das Sitzkissen, um zu verhindern, dass sie zu Boden fällt.


Bezeichnungen der Teile und Funktion

Massagesessel

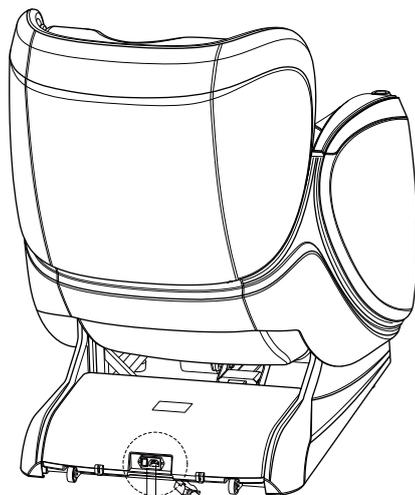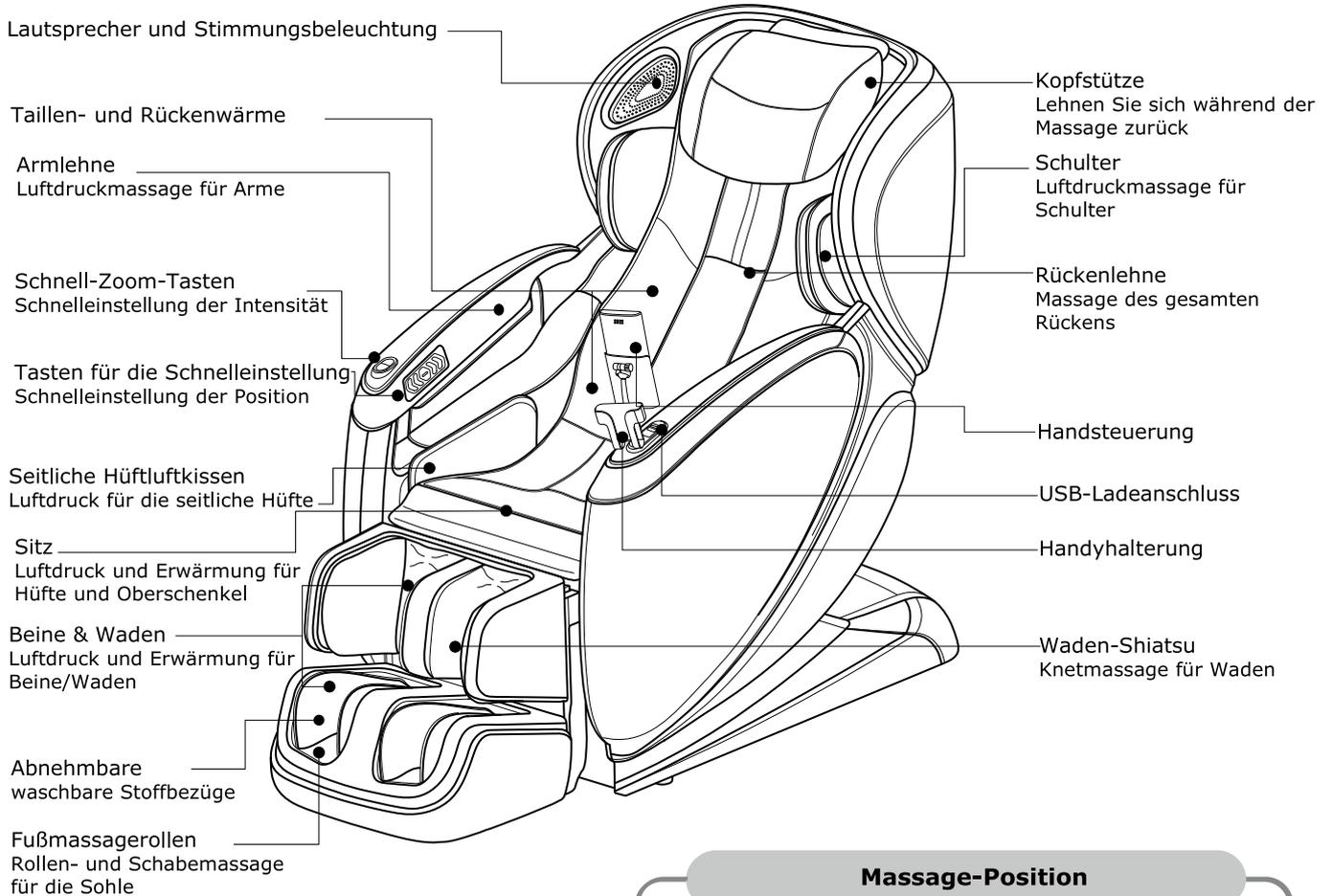


Netzschalter
 Stromeingang Steckdose
 Netzkabel

Massage-Position

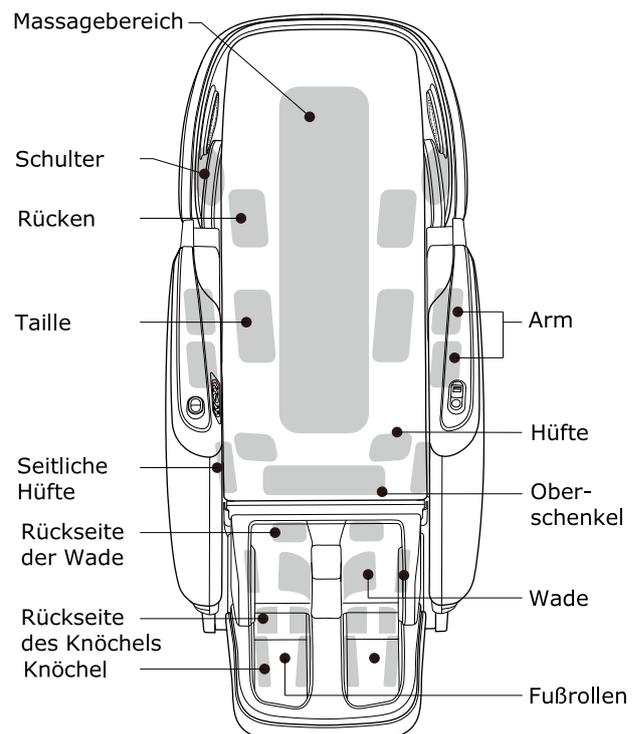

Handsteuerung Tastenfunktionen


Handsteuerung

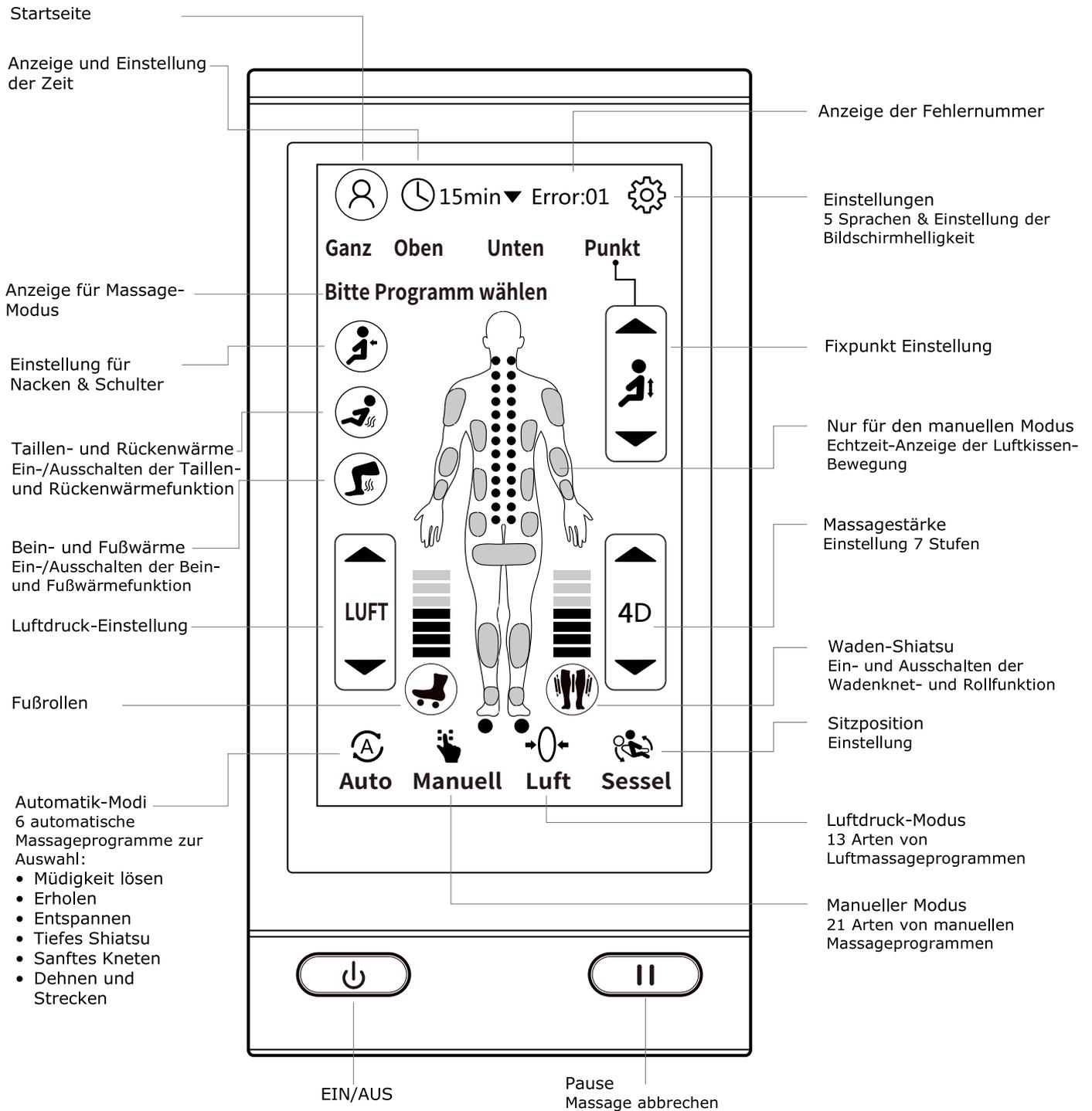

Vor jeder Massage

An Stromversorgung anschließen

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
2. Schalten Sie den Netzschalter ein (Er befindet sich unten an der Rückseite des Sessels.)

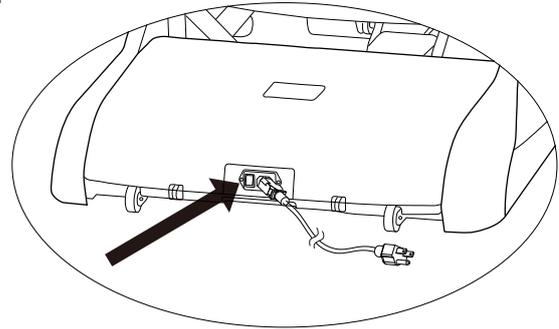

Zu prüfende Punkte

1. Überprüfen Sie die Umgebung
 - Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen, keine Haustiere und keine Gegenstände im Bereich der Rückseite des Massagesessels oder unter der Beinauflage befinden.
 2. Überprüfen Sie den Status des Massagesessels
 - Heben Sie das Rückenpolster an und überprüfen Sie die Rückenabdeckung und andere Teile auf Schäden.
 - Wenn auch nur leicht beschädigt, stellen Sie den Betrieb sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker heraus und fordern Sie eine Reparatur an.
 - Überprüfen Sie das Netzkabel, das Fernbedienungskabel und den Netzstecker auf Schäden. Prüfen Sie auch, ob Haare oder Staub am Netzstecker haften.
 - Bevor Sie sich hinsetzen, vergewissern Sie sich, dass sich die Massagerollen in der Ausgangsposition befinden (alle an der Unterseite der Rückenlehne).
 - Bevor Sie sich hinsetzen, überprüfen Sie auch die Position der Beinauflage. Wenn sich die Beinauflage im hochgeklappten Zustand befindet, kann es beim Hinsetzen zu Verletzungen kommen.
Drücken Sie in diesem Fall die Schnelltaste, um die Beinauflage abzusenken.
- ※ Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und die Rückenlehne wird ebenfalls zurückgesetzt.

Verfahren zum Einstellen des Sessels

Anpassung der Sitzposition


A. Handsteuerung - Schnittstelle zur Einstellung der Sitzposition

1. Drücken Sie  **Seat**, um die Schnittstelle zur Einstellung der Sitzposition aufzurufen. Es gibt 4 Sitzmodi:


- **G** Schwerelosigkeit
-  Wiege
-  Hinlegen
-  Aufstehen

2. Die beste Position kann durch langes Drücken der 6 Richtungstasten eingestellt werden.

3. Nachdem Sie die beste Position ausgewählt haben, drücken Sie die Taste  zur Bestätigung. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden auswählen, wird diese Seite geschlossen.

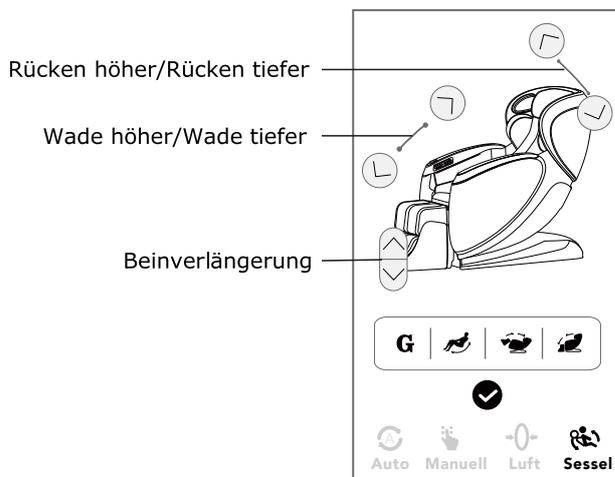

Schwerelosigkeit Wiege Ein/Aus Wade höher Rücken höher

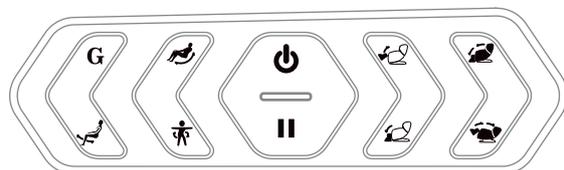

Dehnen Drehen Pause Wade tiefer Rücken tiefer

1. Durch Drücken der Taste  können Sie den Massagesessel ein- oder ausschalten. Wenn Sie den Massagesessel einschalten, stellen Sie den Sitz auf einen bequemen Winkel ein und heben Ihre Füße an.

(Sie können diese Funktion in der Einstellungsschnittstelle ändern.)

2. Durch Drücken der Taste **II** werden alle Aktionen des Massagesessels angehalten. Auf der Anzeige erscheint Pause; drücken Sie die Taste erneut, um neu zu starten.

3. Die Taste **G** kann verwendet werden, nachdem der Sessel eingeschaltet ist. Durch Drücken dieser Taste, wird der Sessel auf Schwerelosigkeit eingestellt.

4. Die Taste  kann verwendet werden, nachdem der Sessel eingeschaltet ist. Durch Drücken dieser Taste, startet die hintere Stößelstange und simuliert die Wiege.

5. Die Taste  und Taste  können verwendet werden, nachdem der Sessel eingeschaltet ist. Durch Drücken dieser Tasten, startet der Sessel den Luftdruck, bzw. öffnet den Dehnen-, Drehen-Modus.

6.  Durch Drücken dieser 4 Tasten, können Sie die entsprechende Sitzposition einstellen.




Bitte beachten Sie!

- Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, die Armlehnen, die Beinauflage oder den Rand, denn dadurch könnte der Benutzer oder der Massagesessel umkippen, was zu einem Unfall oder einer Verletzung führen könnte.
- Wenn Sie die Rückenlehne des Sessels oder die Beinauflage absenken, achten Sie darauf, dass sich hinter und unter der Beinauflage keine Personen, keine Haustiere und keine Gegenstände befinden. Sonst kann es zu einem Unfall kommen.

Schnellstart


- Anschließen der Stromversorgung des Sessels.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Sessels neben dem Netzstecker.
- Ziehen Sie die Schuhe aus und setzen Sie sich auf den Sessel.
- Drücken Sie die  Taste, und der xTouchscreen erscheint wie unten dargestellt.

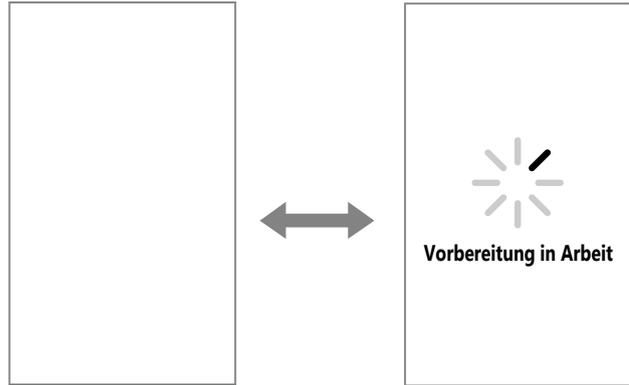


Automatische Massageprogramme

1. Berühren Sie den Automatikmodus auf der Anzeige, um das gewünschte Programm auszuwählen.

- 6 automatische Massageprogramme zur Auswahl: Müdigkeit lösen, Erholen, Entspannen, tiefes Shiatsu, sanftes Kneten, Dehnen und Strecken.
- Nach Auswahl des gewünschten Programms, drücken Sie die Taste  zur Bestätigung. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden auswählen, wird diese Seite geschlossen.
- Wenn der Automatikmodus zum ersten Mal nach dem Einschalten gewählt wird, führt der Massagesessel eine Schulter-Nacken-Positionserkennung und einen Rückenkurventest durch und erkennt gleichzeitig die Beine.

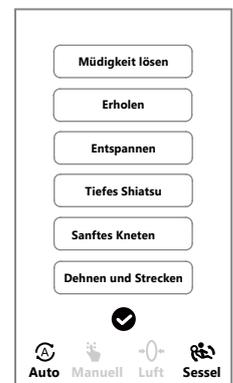


2. Erkennung der Schulterposition und Erkennung der Rückenkurve.

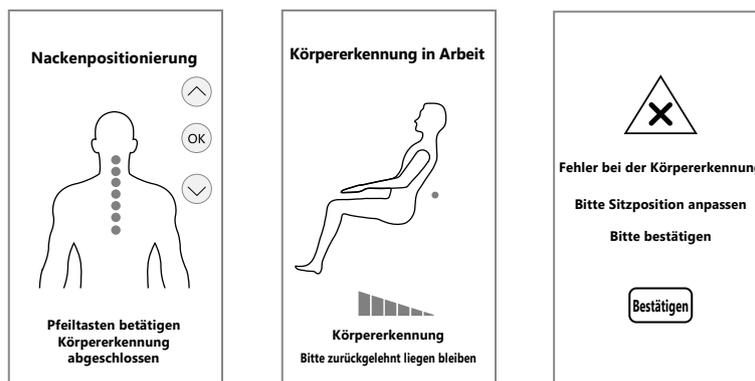


- Nach Erkennung der Schulterposition können Sie den Pfeil nach oben und unten für eine geeignete Einstellung drücken. Drücken Sie dann die OK-Taste zur Bestätigung.
- Während der Erkennung der Körperform zeigt das Erkennungslicht die aktuelle Erkennungsposition an.
- Wenn keine Person auf dem Massagesessel sitzt oder die Körperform nicht erkannt wird, erscheint die Seite „Body detection in error“, die eine fehlerhafte Körpererkennung anzeigt. Drücken Sie dann die Taste „Confirm“ (Bestätigen) auf der Anzeige, um den Test zu wiederholen.
- Wenn die Rückenbelastung viermal hintereinander nicht erkannt wird, wird erneut danach gesucht.
- Wenn der Test abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste , um den Test zu beenden. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden bestätigen, wird diese Seite geschlossen.

Automatische Massageprogramme

3. Nachdem die Erkennung abgeschlossen ist, wird auf dem Touchscreen Ihre Rückenkurve wie rechts abgebildet angezeigt. Dann beginnt der Sessel das Massageprogramm.

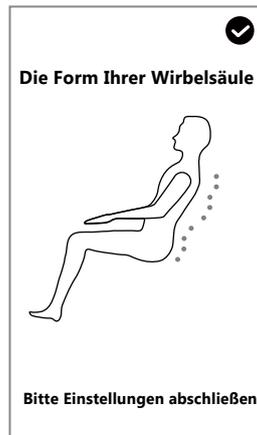


4. Auf dem Touchscreen wird das aktuelle Automatikprogramm der Massage angezeigt.

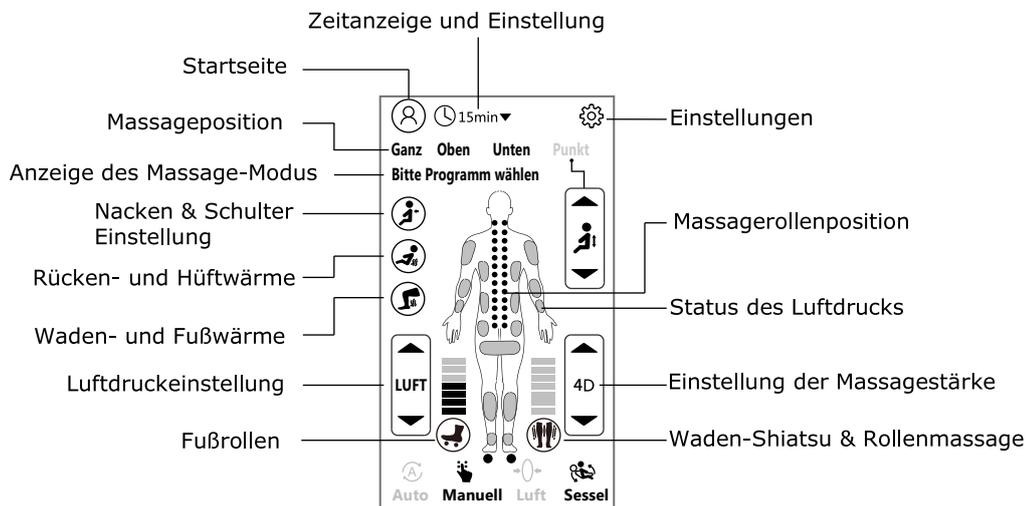

5. Im Automatikprogramm gibt es 3 Massagepositionen zur Auswahl: Ganzkörper, Schulter und Nacken, Taille und Hüfte.

6. Nacken- und Schultereinstellung: Sie können die Position der Nacken- und Schultermassage einstellen, wenn der Touchscreen unten angezeigt wird.

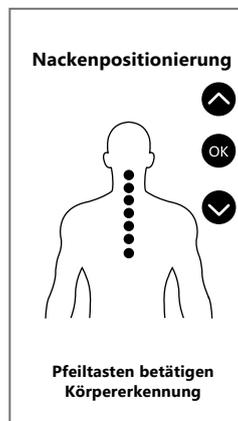

7. Rücken- und Hüftwärme:  Berühren Sie diese Funktion, um die Wärmefunktion für Rücken und Gesäß ein- oder auszuschalten.

Automatische Massageprogramme

8. Waden- und Fußwärme: Drücken Sie auf , um die Wärmefunktion für Waden und Füße ein- oder auszuschalten.
9. Einstellung des Luftdrucks: Drücken Sie auf , um den Druck zu erhöhen, und drücken Sie auf , um den Druck zu verringern. Wenn die Intensität auf 0 reduziert wird, wird die Luftdruckfunktion ausgeschaltet. Wenn die Druckintensität von 0 auf 1 erhöht wird, wird der empfohlene Standardmodus aktiviert.
10. Status des Luftdrucks: Sie kann die aktuelle Position der Luftmassage anzeigen.
11. 4D-Massagestärke: Drücken Sie auf , um die Massageintensität zu erhöhen, und drücken Sie auf , um die Massageintensität zu verringern. Es gibt 7 Intensitätsstufen, die sowohl im manuellen Modus als auch im automatischen Modus eingestellt werden können.
12. Fußrollen: Drücken Sie auf , um die Fußrollenfunktion ein- oder auszuschalten.
13. Waden-Shiatsu & Rollen: Drücken Sie auf , um die Shiatsu- und Rollenfunktionen für die Waden ein- oder auszuschalten.
14. Zeitanzeige und Einstellung:  zeigt die verbleibende Massagezeit nach dem Einschalten an. Drücken Sie diese Taste, um die Schnittstelle für die Zeiteinstellung aufzurufen. Die voreingestellte Zeit beträgt 15 Minuten nach dem Einschalten. Nach Beendigung der Massage kehren die Massagerollen in ihre Ausgangsposition zurück, aber die Sitzposition wird nicht zurückgesetzt. Wenn die verbleibende Zeit als 0 Minuten angezeigt wird, drücken Sie auf  innerhalb von 1 Minute, um die Zeit zurückzusetzen. Andernfalls wird nach 1 Minute abgeschaltet.
15. Einstellungen:
- Es stehen 5 Sprachen zur Auswahl.
 - Automatisches Anheben des Fußteils, um festzulegen, ob das Fußteil nach dem Einschalten des Geräts automatisch angehoben werden sollen.
 - Automatische Sesselaufrichtung, um festzulegen, ob die Position des Sessels nach dem Programmende automatisch in die aufrechte Position erfolgen soll.
 - Anzeighelligkeit: Es gibt insgesamt 7 Stufen für die Helligkeitseinstellung.
 - Lampenlicht, um die Bluetooth-Leuchte und „Massagesessel Welt“ Logo-Leuchte des Massagesessels zu wählen. Wenn Sie diese Anzeige berühren, wird die Bluetooth-Leuchte und Logo-Leuchte eingeschaltet. Es stehen 15 verschiedene Bluetooth-Leuchten zur Auswahl. Wenn die Bluetooth-Leuchte aus ist, schaltet sich die Logo-Leuchte aus.
 - Wenn Sie  berühren oder die Anzeige für 10 Sekunden nicht berühren, wird diese Seite verlassen.
16. Nach Beendigung des Programms kehren die Massagerollen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
17. Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.

Grundlegende Massagemethoden

- **Berühren Sie den manuellen Modus auf der Anzeige, um das gewünschte Programm auszuwählen.**

Grundlegende Massagetechniken


- **Nach oben Kneten**
Knetmassage von unten nach oben
- **Nach unten Kneten**
Knetmassage von oben nach unten
- **Rollen**
Rollmassage und Dehnung der Wirbelsäule
- **Klopfen**
Rhythmisch klopfen, Muskelkater lindern
- **Kreisförmig**
Kneten während des Klopfens beseitigt Ermüdung mit feinen Bewegungen
- **Tiefenkneten h**
Massage der Muskeln von unten nach oben
- **Tiefenkneten r**
Kräftiges Kneten der Muskeln von oben nach unten
- **Nacken**
Entspannen des Nackenbereichs
- **Taille**
Entspannen der Taille
- **Shiatsu**
Die Kraft konzentriert sich auf einen festen Punkt zur Massage

3 spezielle Massagemethoden - 4D, Dehnen und Spezial:

- **Nach oben Kneten + 4D:** Knetmassage von unten nach oben mit Zoom in/out Massagebewegungen
- **Nach unten Kneten + 4D:** Knetmassage von oben nach unten mit Zoom in/out Massagebewegungen
- **Klopfen + 4D:** Rhythmisches Klopfen mit Zoom in/out Massagebewegungen
- **Kreisförmig + 4D:** Kneten während des Klopfens, beseitigt Ermüdung mit feinen Bewegungen; mit Zoom in/out Massagebewegungen
- **Nach oben Kneten + Dehnen:** Schieben und Ziehen von unten nach oben, während die Muskeln geknetet werden
- **Nach unten Kneten + Dehnen:** Schieben und Ziehen von oben nach unten, während die Muskeln geknetet werden
- **Klopfen + Dehnen:** Schieben und Ziehen von unten nach oben und dabei rhythmisches Klopfen
- **Kreisförmig + Dehnen:** Schieben und Ziehen von unten nach oben und dabei Kneten und Klopfen
- **Nach oben Kneten + Spezial:** Vom oberen Rücken ausgehend, Fokus auf das Kneten um die Schultern
- **Klopfen + Spezial:** Vom oberen Rücken ausgehend, Fokus auf rhythmisches Klopfen um die Schultern
- **Entspannen der Taille + Spezial:** Fokus auf Kneten und Massieren der Taille mit rhythmischen Massagebewegungen

Schnellstart

- Anschließen der Stromversorgung des Sessels.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Sessels neben dem Netzstecker.
- Ziehen Sie die Schuhe aus und setzen Sie sich auf den Sessel.
- Drücken Sie die  Taste, und der Touchscreen erscheint wie unten dargestellt.


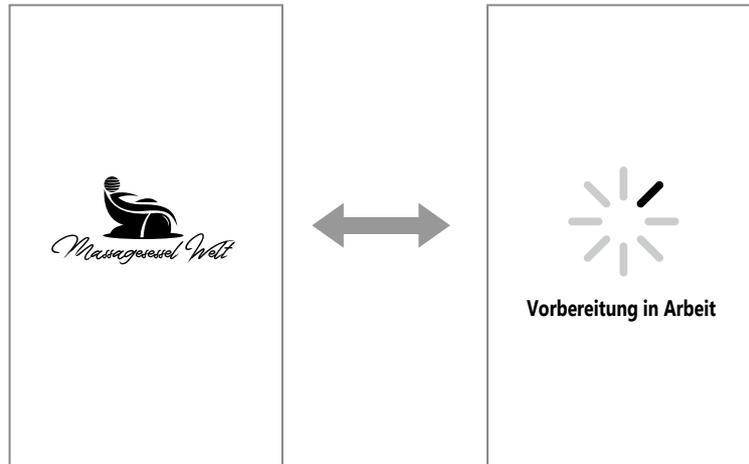


1. Berühren Sie den manuellen Modus auf der Anzeige, um das gewünschte Programm auszuwählen.

2. Der manuelle Modus bietet 10 Grundmethoden, 3 Spezialmethoden und optionale Optionen für Massagegeschwindigkeit und Massagebereich. Es sind nicht alle Massagekombinationen verfügbar.

- Nach Auswahl der gewünschten Massagekombination, drücken Sie auf die Taste  zur Bestätigung. Wenn Sie die Anzeige nicht innerhalb von 10 Sekunden berühren, wird diese Seite geschlossen.
- Wenn die Farbe grau ist, bedeutet das, dass die Funktion nicht ausgewählt werden kann, orange bedeutet, dass sie ausgewählt wurde, und blau bedeutet, dass sie noch nicht ausgewählt wurde.

3. Auf dem Touchscreen wird das aktuell in der Massage verwendete manuelle Programm angezeigt.

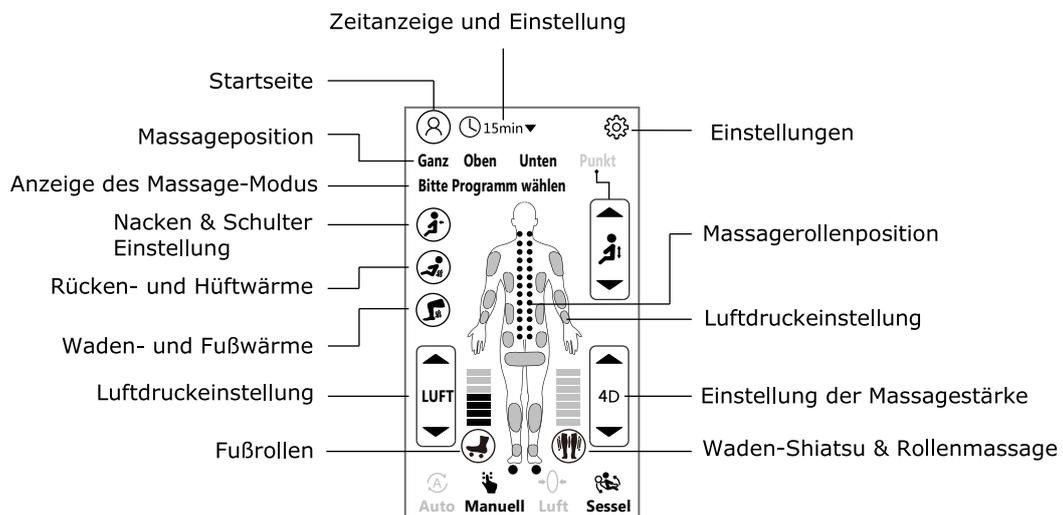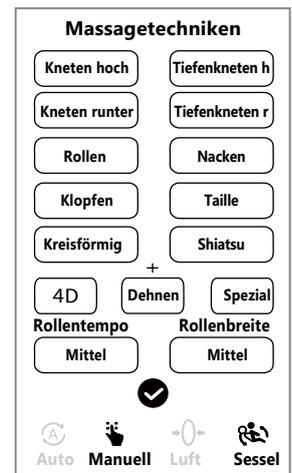

Manueller Massage-Modus

4. Im manuellen Programm gibt es 4 Massagepositionen zur Auswahl: Ganzkörper, Schulter und Nacken, Taille & Hüfte, Punkt.

5. Einstellung der Massagegeschwindigkeit:  berühren, um zwischen drei Geschwindigkeiten zu wählen: „schnell, mittel und langsam“. Diese Funktion ist möglicherweise nicht für alle Massagemethoden verfügbar.

- Wenn die Farbe grau ist, bedeutet das, dass die Funktion nicht ausgewählt werden kann, orange bedeutet, dass sie ausgewählt wurde, und blau bedeutet, dass sie noch nicht ausgewählt wurde.

6. Einstellung des Massagebereichs:  berühren, um zwischen drei Bereichen zu wählen: „breit, mittel und schmal“. Diese Funktion ist möglicherweise nicht für alle Massagemethoden verfügbar.

- Wenn die Farbe grau ist, bedeutet das, dass die Funktion nicht ausgewählt werden kann, orange bedeutet, dass sie ausgewählt wurde, und blau bedeutet, dass sie noch nicht ausgewählt wurde.

7. Zum Ändern der Luftdruckfunktion im manuellen Modus:  direkt berühren, um die Auswahlseite zu öffnen.

- Wenn die Farbe grau ist, bedeutet das, dass die Funktion nicht ausgewählt werden kann, orange bedeutet, dass sie ausgewählt wurde, und blau bedeutet, dass sie noch nicht ausgewählt wurde.

8. Rücken- und Hüftwärme: Drücken Sie auf , um die Wärmefunktion für Rücken und Gesäß ein- oder auszuschalten.

Waden- und Fußwärme: Drücken Sie auf , um die Wärmefunktion für Waden und Füße ein- oder auszuschalten.


9. Einstellung des Luftdrucks: Drücken Sie auf , um den Druck zu erhöhen, und drücken Sie auf , um den Druck zu verringern. Wenn die Intensität auf 0 reduziert wird, wird die Luftdruckfunktion ausgeschaltet. Wenn die Druckintensität von 0 auf 1 erhöht wird, wird der empfohlene Standardmodus aktiviert.

10. Status des Luftdrucks: Zeigt die aktuelle Position der Luftmassage an.

Luftdruckmassage-Modus

Schnellstart

- Anschließen der Stromversorgung des Sessels.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Sessels neben dem Netzstecker.
- Ziehen Sie die Schuhe aus und setzen Sie sich auf den Sessel.
- Drücken Sie die  Taste, und der Touchscreen erscheint wie unten dargestellt.

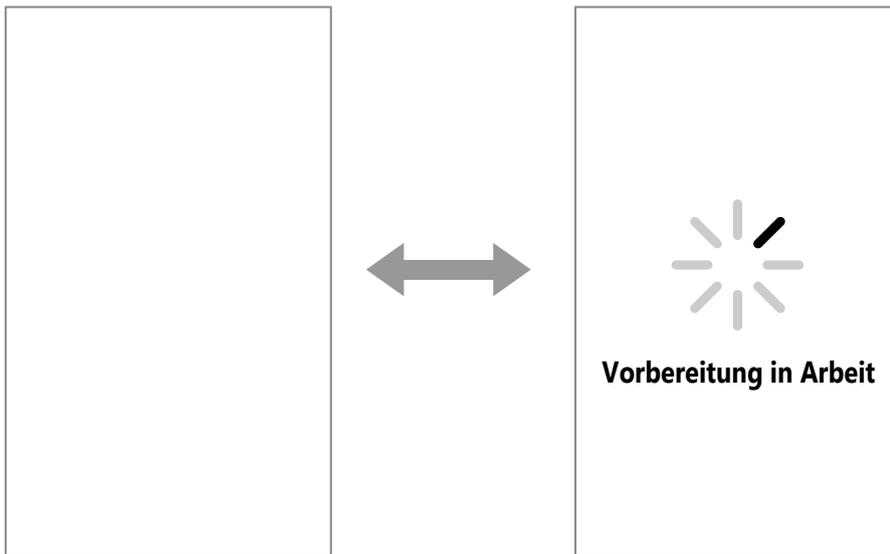

Luftdruckmassage-Modus


1. Berühren Sie den Luftdruck-Modus auf der Anzeige, um das gewünschte Programm auszuwählen.
2. Es gibt 6 automatische Modi (Empfohlen, Entspannung, Zirkulation, Energie, Mittagspause und Nachtruhe) und 4 manuelle Modi für partiellen Luftdruck (Schulter, Arm & Hand, Taille & Hüfte Wade & Fuß) sowie 3 spezielle Methoden (Pulsieren, Verdrehen und Dehnen) im Luftdruckmodus. Es sind nicht alle Massagekombinationen verfügbar.



- Nach Auswahl der gewünschten Massagekombination, drücken Sie auf die Taste  zur Bestätigung. Wenn Sie die Anzeige nicht innerhalb von 10 Sekunden berühren, wird diese Seite geschlossen.
- Wenn die Farbe grau ist, bedeutet das, dass die Funktion nicht ausgewählt werden kann, orange bedeutet, dass sie ausgewählt wurde, und blau bedeutet, dass sie noch nicht ausgewählt wurde.

Luftdruckmassage-Modus

3. Auf dem Touchscreen wird das aktuell in der Massage verwendete manuelle Programm angezeigt.

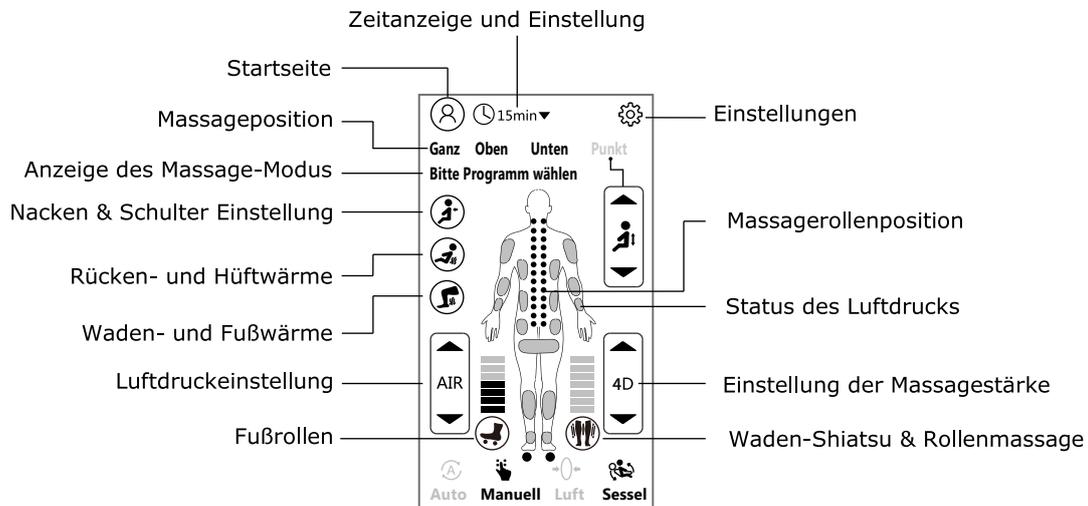

4. Rücken- und Hüftwärme: berühren, um die Wärmefunktion für Rücken und Gesäß ein- oder auszuschalten.

5. Waden- und Fußwärme: berühren, um die Wärmefunktion für Waden und Füße ein- oder auszuschalten.

6. Einstellung des Luftdrucks: Drücken Sie auf , um den Druck zu erhöhen, und drücken Sie auf , um den Druck zu verringern. Wenn die Intensität auf 0 reduziert wird, wird die Luftdruckfunktion ausgeschaltet. Wenn die Druckintensität von 0 auf 1 erhöht wird, wird der empfohlene Standardmodus aktiviert.

7. Status des Luftdrucks: Zeigt die aktuelle Position der Luftmassage an.


8. Fußrollen: berühren, um die Fußrollenfunktion ein- oder auszuschalten.

9. Waden-Shiatsu und Rollen: berühren, um die Shiatsu- und Rollenfunktionen für die Waden ein- oder auszuschalten.

Andere Funktionen

1. Einstellungen

- Es stehen 5 Sprachen zur Auswahl.
- Auto Fußanhebung der Füße, um festzulegen, ob die Füße nach dem Einschalten des Geräts automatisch angehoben werden sollen.
- Automatische Speicherung, um festzulegen, ob die Einstellungen des Sessels nach dem Ausschalten gespeichert werden sollen.
- Bildhelligkeit: es gibt insgesamt 7 Stufen für die Helligkeitseinstellung.
- Lampenlicht, um die Bluetooth-Leuchte und „Massagesessel Welt“ Logo-Leuchte des Massagesessels zu wählen. Wenn Sie diese Anzeige berühren, wird die Bluetooth-Leuchte und Logo-Leuchte eingeschaltet. Es stehen 15 verschiedene Bluetooth-Leuchten zur Auswahl. Wenn die Bluetooth-Leuchte aus ist, schaltet sich die Logo-Leuchte aus.
- Wenn Sie  berühren oder die Anzeige für 10 Sekunden nicht berühren, wird diese Seite verlassen.

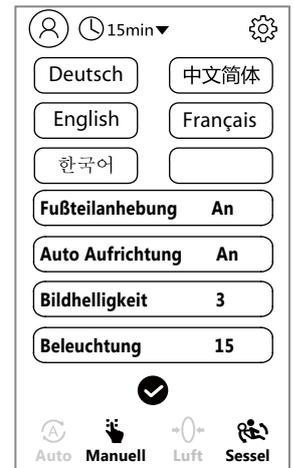


2. Bluetooth

- Schaltet Bluetooth auf dem Telefon ein, verbindet sich mit dem Bluetooth-Namen „MSW-16003HH“, und die vom Handy gespielte Musik wird über die Lautsprecher des Massagesessels wiedergegeben.


3. Timing

- Es stehen 4 Zeitvorgaben zur Auswahl (15 min, 20 min, 25 min und 30 min). Nach der Auswahl wird das Auswahlmenü automatisch verlassen.
- Wenn die Anzeige für 10 Sekunden nicht berührt wird, wird das Auswahlmenü verlassen.

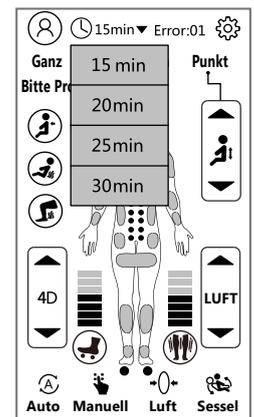

4. Schnell-Zoom-Tasten

Die Intensität der Massage kann durch Drücken der Tasten von +4D & 4D- eingestellt werden. Es gibt 7 Intensitätsstufen, die sowohl im manuellen Modus als auch im automatischen Modus eingestellt werden können.

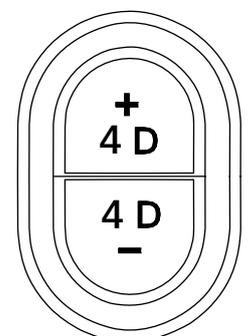

Massage abbrechen

- Drücken Sie die Taste , die Massagerollen kehren in ihre Ausgangsposition zurück.
- Drücken Sie die Taste , die Massagerollen halten an der aktuellen Position an.


Reinigung und Lagerung

Anweisungen zur Reinigung

Reinigung des Kunstleders


Wischen Sie die Oberfläche des Kunstleders mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Reinigen Sie den Sessel nicht mit Chemikalien, die z.B. Verdünner, Benzin oder Alkohol enthalten.
- Wenn Sie im Handel erhältliche Lederpflegemittel (z.B. Reinigungstücher) verwenden, beachten Sie deren Gebrauchsanweisung.
- Wenn das Kunstleder stark verschmutzt ist, versuchen Sie die folgende Methode.
 1. Weichen Sie ein weiches Tuch in einer Lösung aus 3% bis 5% neutralem Reinigungsmittel und heißem Wasser ein. Wringen Sie es aus.
 2. Wischen Sie die Oberfläche des Kunstleders mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
 3. Wischen Sie die Reinigungsmittelreste mit einem weichen, mit klarem Wasser getränkten und ausgewrungenen Tuch vom Sessel ab.
 4. Lassen Sie das Kunstleder an der Luft von alleine trocknen.
- Wenn sich die Flecken mit der obigen Methode nur schwer entfernen lassen, weichen Sie ein Stück Melaminschaumstoff in einem neutralen Reinigungsmittel ein und wischen Sie damit den Sessel ab. Trocknen Sie die Oberfläche nicht mit einem Haartrockner.
- Stofffarben können die Oberfläche des Kunstleders einfärben, seien Sie vorsichtig beim Abwischen des Sessels mit Jeansstoff oder farbigen Stoff.

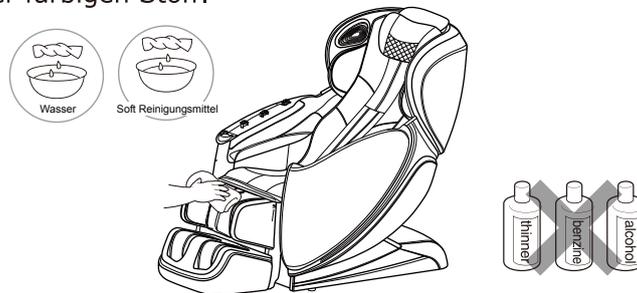

Reinigung der Kunststoffteile


1. Legen Sie ein weiches Tuch in heißes, mit einem neutralen Reinigungsmittel versetztes Wasser oder Glasreiniger, wringen Sie es aus und wischen Sie die Kunststoffteile ab.
- Reinigen Sie den Sessel nicht mit Chemikalien, die z.B. Verdünner, Benzin oder Alkohol enthalten.
2. Wischen Sie die Reinigungsmittelreste mit einem weichen, mit klarem Wasser getränkten und ausgewrungenen Tuch vom Sessel ab.
- Wringen Sie das Tuch gründlich aus, bevor Sie es zum Abwischen der Fernbedienung verwenden.
3. Lassen Sie die Kunststoffteile an der Luft trocknen.

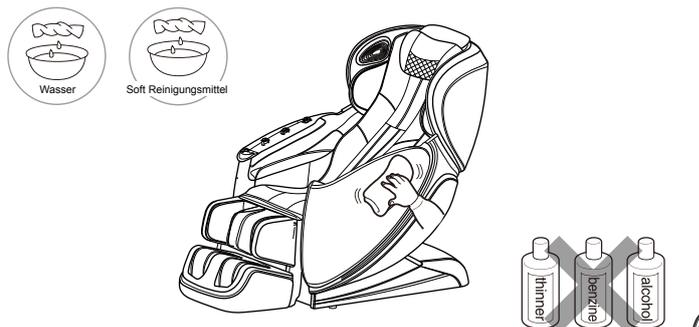

Reinigung der Stoffteile

- Entfernen Sie die Fußstoffverkleidung vom Sessel
- Handwäsche und an der Luft trocknen lassen
- Bringen Sie die Fußstoffverkleidung wieder am Sessel an

Abnehmbare
waschbare
Stoffverkleidung

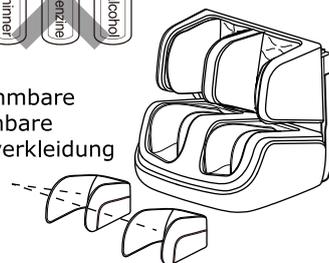

Lagerung

Nachdem Sie Flecken und Staub abgewischt haben, lagern Sie den Sessel an einem trockenen Ort. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, packen Sie es in eine Schutzhülle, um Staub zu vermeiden.

Hinweis: Nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht stehen lassen. Stellen Sie den Sessel nicht in die Nähe von Orten mit hohen Temperaturen, wie z. B. Heizungen oder Öfen, um Verfärbungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Fehlerbehebung



Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Sessel niemals ohne Genehmigung. Dies kann zu Funkenbildung oder Verletzungen aufgrund von abnormalem Betrieb führen.

Die folgenden Geräusche während der Massage werden durch die Struktur verursacht. Sie sind normal und haben keine Auswirkungen auf die Lebensdauer.

- Das Geräusch der sich auf und ab bewegenden Massagerollen.
- Das Geräusch von Getrieben und Motoren während der Massage.
- Reibungsgeräusche von Massagerollen und Sesselbezug (insbesondere bei der Knetmassage).
- Das Geräusch beim Klopfen und der kreisförmigen Massage (insbesondere bei der Bewegung von der Schulter zum Rücken).
- Aufgrund der unterschiedlichen Art der Kraftanwendung auf die Massagerollen während der Knet-, Klopf- und Kreismassage kann sich die Massagegeschwindigkeit ändern.
- Unterschiedliche Massagegeschwindigkeiten verursachen unterschiedliche Geräusche.
- Motorgeräusch bei erhöhter Belastung.
- Das Geräusch im Automatikprogramm, wenn die Massagerollen automatisch vorwärts und rückwärts an die Körperform des Benutzers angepasst werden.
- Das Geräusch des Aufblasens und Ablassens bei der Luftdruckmassage.
- Das Geräusch der Reibung (Quietschen) von Rückenlehne und Sitz beim Anheben des Sessels.
- Die linken und rechten Massagerollen sind unterschiedlich hoch.

(Aufgrund des Massage-Designs mit abwechselndem Klopfen nach links und rechts ist es unvermeidlich, dass die Höhe der Massagerollen unterschiedlich ist, was keine Fehlfunktion darstellt.)

Fehlererscheinung	Fehlerursache	Fehlerbehebung	Referenzseite
Der Massagesessel reagiert nicht	Hat sich der Netzstecker gelöst?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	11
	Ist der Netzschalter unter der Rückenlehne des Sitzes ausgeschaltet?	Schalten Sie den Netzschalter ein.	11
Der Massagesessel pausiert oder stoppt manchmal (die Steuerung funktioniert nicht richtig)	Liegt die Rückenlehne des Sessel an einer Wand oder einem anderen Gegenstand an?	Bewegen Sie den Massagesessel, um sicherzustellen, dass um ihn herum ausreichend Platz vorhanden ist. Ist der Netzschalter unter der Rückenlehne des Sitzes ausgeschaltet.	8-11
	Wird zu viel Kraft auf den Sessel ausgeübt? (Um die Sicherheit zu gewährleisten, wenn eine abnormale äußere Kraft auf die Massagerollen einwirkt, aktiviert der Massagesessel automatisch die Sicherheitsvorrichtung, um alle Massagefunktionen anzuhalten.)	Verlassen Sie den Sessel, schalten Sie den Netzschalter aus und schalten Sie ihn wieder ein. Wählen Sie eine Funktion und starten Sie erneut.	11
Die Rückenlehne kann nicht abgesenkt oder angehoben werden	Hat sich der Netzstecker gelöst?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	11-12
	Liegt die Rückenlehne des Sessel an einer Wand oder einem anderen Gegenstand an?	Bewegen Sie den Massagesessel, um sicherzustellen, dass um ihn herum ausreichend Platz vorhanden ist.	8, 11, 12

Wenn eine ungewöhnliche Seite auf der Anzeige erscheint, klicken Sie auf „Bestätigen“ oder die Seite wird nach 10 Sekunden geschlossen.

- Wenn der Sessel nach den oben genannten Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzstecker heraus und wenden Sie sich an den Verkäufer.

Wartung & Garantie

Wartung

Wenn Sie den Sessel mehrere Jahre nicht mehr benutzt haben, lassen Sie ihn vor der Benutzung unbedingt warten.	<p>Prüfen Sie, ob die folgenden Erscheinungen auftreten?</p> <ul style="list-style-type: none">• Brandgeruch• Das Netzkabel und der Stecker sind ungewöhnlich heiß• Unterbrochene Stromversorgung beim Bewegen des Netzkabels	Nicht mehr verwenden	Um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Beauftragen Sie unbedingt einen Fachhändler mit der Inspektion und Reparatur.
---	---	-----------------------------	--

Garantie

Der Sessel wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung genauestens geprüft.

Nennspannung: 220V-240V(50-60Hz)

Nenndauer: 15 min

Nennleistung: 230W

Stärke der Massagerollen: Kneten: 3 Stufen

Massagegeschwindigkeit: Klopfen: 3 Stufen

Intensität der Massagerollen: 7 Stufen

Intensität der Luftdruckmassage: 7 Stufen

Auto-Timer: 15 Min. voreingestellt; 15 min, 20 min, 25 min, 30 min sind einstellbar

Einstellbare Winkel der Rückenlehne: 106°~132°

Einstellbare Winkel des Sitzes: 0°~46°

Größe: 160 x 81 x 119 cm (Liegegröße: 194 x 81 x 108 cm)

Gewicht: 133 kg (Gesamtgewicht)/ 106 kg (Nettogewicht)

***Dieser Massagesessel darf nicht mit anderen Spannungen als der Nennspannung betrieben werden.**

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Verbesserungen an dem Sessel und Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Das Erscheinungsbild des Sessels basiert auf dem physischen Objekt.